

Wet-Stop³®

Tragbarer Alarm - Anleitung

Das Wet-Stop³ Gerät ist ein System für die Verhaltensmodifikation bei der Behandlung von Bettnässen. Das Gerät kann benutzt werden zur Auffindung von Nässe, die durch urinieren hervorgerufen wurde. Das Gerät besteht aus einem Alarmgerät, welches durch ein Kabel mit einem Sensor verbunden ist. Das Alarmgerät ist ausgestattet mit einem magnetischen Verbindungssystem, welches mit einem Schlafanzug oder Nachthemd getragen werden kann. Der Alarm hat 5 verschiedene Töne, um zu verhindern, dass der Anwender sich an den Klang gewöhnt. Der Sensor ist mit einer Schnellclip-Technik ausgestattet, so dass man das Gerät leicht an Schlafanzughosen oder Unterwäsche befestigen kann.

Wie benutzen Sie den Wet-Stop Alarm?

Vorbereitung: Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei AAA Batterien ein (nicht mitgeliefert). Wenn die Batterien voll sind und korrekt eingelegt worden sind, sollte der weiße Knopf an der Seite des Gerätes aufblinken. Befestigen Sie das Sensorkabel indem Sie das Ende fest in das Gerät einführen. Öffnen Sie den Sensor-Clip, legen Sie ein nasses Tuch hinein und schließen Sie den Clip. Der Alarm funktioniert, wenn es jetzt vibriert oder Töne zu hören sind. Um den Alarm zu stoppen drücken Sie den weißen Knopf 3-4 Sekunden UND ziehen Sie entweder das Kabel heraus oder wischen Sie den Sensor komplett trocken. Mit anderen Worten, Sie müssen zwei Schritte beachten: Der Alarm wird nicht aufhören, bis Sie den Knopf 3-4 Sekunden drücken und entweder das Kabel entfernen oder den Sensor trocken reiben. Wenn Sie den Sensor trocknen, öffnen Sie den Clip vollständig und trocknen Sie die Ober- und Unterseite des Sensors mit einem trockenen Tuch, Handtuch oder Toilettenpapier. **Manchmal wird die Feuchtigkeit von Ihrem Finger den Alarm auslösen. Wenn dies vorkommt, einfach stellen Sie den Alarm um.**

Wet-Stop³ Benutzung: Öffnen Sie das Batteriefach und schieben Sie den Knopf entweder zu V= nur Vibration; A= nur Alarm oder VA= Vibration und Alarm. Legen Sie die Batterien ein und schließen Sie das Fach. Befestigen Sie das Gerät am Schlafanzugoberteil mithilfe der Magnetriemen. Sie können den Alarm auch mit einer Sicherheitsnadel befestigen, die Sie durch das Loch am Ende des Befestigungsriemens anbringen. Als nächstes führen Sie den Sensor unter den Schlafanzug oder das Nachthemd indem Sie ihn am Kragen ein- und am Saum ausführen. Befestigen Sie den Sensor an der Unterwäsche durch das Öffnen des Clips und ziehen Sie die Unterwäsche in die Sensoröffnung. Schließen Sie jetzt den Clip. Ziehen Sie leicht an dem Sensor, um sicherzugehen, dass er fest geschlossen ist. Schon eine kleine Menge Flüssigkeit an der Unterwäsche, die mit dem Sensor in Kontakt kommt, löst den Alarm aus, also befestigen Sie den Sensor in Nähe der Harnröhre. Wenn der Alarm ausgelöst wurde, sollte das Kind den Wet-Stop ausmachen, indem es den weißen Off-Knopf für 3-4 Sekunden drückt UND entweder das Kabel entfernt oder den Sensor komplett trocken reibt. Bitte bedenken Sie, der Alarm wird nicht aufhören, bis der Knopf 3-4 Sekunden gedrückt und entweder das Kabel entfernt oder der Sensor trocken gerieben wird mithilfe von einem trockenen Tuch, Handtuch oder Toilettenpapier. Der Hintergrund hier ist, dass das Kind den Alarm nicht ausschalten kann, ohne vollständig wach zu sein. Der Alarm wird nicht stoppen, wenn diese beiden Schritte nicht befolgt werden.

Vorsicht: Der Alarm sollte nicht dichter als bis zu 5cm ans Ohr gehalten werden.

Elterliche Hilfe wird benötigt bei Nutzung des Alarms:

Während der Nutzung des Alarms wird elterlich Hilfe benötigt, um dem Kind beizubringen, was zu tun ist, wenn Alarm oder Vibration ausgelöst werden. Während dieser Zeit ist es normal, dass das Kind die Blase im Bett entleert und dann nicht mehr auf die Toilette muss. Während der ersten Wochen sollte das Kind lernen, die Blase nicht völlig zu entleeren im Bett sondern das urinieren auf der Toilette zu beenden. Jeder Erfolg sollte zur Folge haben, dass der nasse Fleck im Bett immer kleiner wird. Bald danach sollte das Kind anfangen zu erwachen, wenn es Harndrang verspürt, um dem Alarm zuvorzukommen. Es wird auch später noch Momente geben, wo der Alarm ausgelöst wird, und nur die Unterwäsche feucht ist, das Bett aber trocken. Nach ein bis drei Monaten sollte das Kind über längere Zeiträume trocken bleiben. Es kann immer noch gelegentlich vorkommen, dass das Bett genässt wird, deshalb benutzen Sie bitte den Alarm bis das Kind einen ganzen Monat hintereinander trocken geblieben ist. Dann könne Sie die Nutzung beenden.

Als Rückfall wird angesehen, wenn das Kind zwei oder mehr Nächte hintereinander ins Bett macht nach einem Monat oder mehr Trockenheit. Im Falle eines Rückfalls, fangen Sie sofort wieder mit der Benutzung des Alarms an. Rückfälle sind im Allgemeinen leichter zu behandeln als das ursprüngliche Bettnässen. Das Kind muss eventuell noch einmal mit elterlicher Hilfe lernen, den Alarm zu nutzen. Ergebnisse sind von Kind zu Kind unterschiedlich.

Trainings-Tipps:

- 1 - Das Kind muss jede Nacht daran erinnert werden, mit dem Urinieren aufzuhören, wenn der Alarm ausgelöst wird – auch wenn es träumt
- 2 - Während der ersten Wochen, helfen Sie ihrem Kind aufzustehen im Bad zu Ende zu urinieren wenn der Alarm ausgelöst wird. Schalten Sie das Licht an und helfen Sie Ihrem Kind aufzuwachen. Kaltes Wasser oder ein kalter Waschlappen im Gesicht helfen normalerweise das Kind auch aus dem Tiefschlaf zu wecken. Ihr Kind sollte den Alarm stoppen – nicht Sie – damit das Training effektiv ist. Fragen Sie ihr Kind am nächsten Morgen, ob es sich erinnert, was es getan hat, als der Alarm ausgelöst wurde.
- 3 - Bringen Sie das Kind nicht nachts regelmäßig auf die Toilette, außer vor dem Schlafengehen oder wenn der Arzt es angeordnet hat. Dadurch wird die Auslösung des Alarms vermieden, das Training wird vermieden und das Kind wird nicht lernen, selbständig aufzuwachen.
- 4 - Wenn die Unterwäsche nass ist sollte das Kind diese wechseln und den sauberen, trockenen Sensor an der trockenen Unterwäsche befestigen, bevor es wieder ins Bett geht. Wenn das Bett nass ist, wechseln Sie die Bettwäsche oder bedecken Sie den nassen Fleck mit einem Handtuch oder Ähnlichem, damit die frische Unterwäsche nicht feucht wird.
- 5 - Eine Extra-Stunde Schlaf oder regelmäßige Mittagsruhe können helfen Müdigkeit zu verhindern und schnell auf den Alarm zu reagieren. Übermäßige Müdigkeit wird den Schlaf des Kindes vertiefen und das Kind wird schlechter auf den Alarm reagieren.
- 6 - Ein Nachtlicht hilft dem Kind auch, besser auf den Alarm zu reagieren. Wenn besondere Schwierigkeiten auftreten sollten beim Aufwachen, schalten Sie eine Nachtschlampe an im Zimmer nachdem das Kind eingeschlafen ist.
- 7 - Loben Sie das Kind bei jedem Erfolg, z.B. wenn es zum Alarm erwacht, oder bei kleineren Unfällen. Loben Sie das Kind über alle Maßen, wenn es dem Alarm zuvorzukommt und vor dem Auslösen aufwacht. Sie und ihr Kind sollten trockene und nasse Nächte in einen Kalender eintragen. Benutzen Sie einen Belohnungskalender mit Aufklebern, die mit dem Wet-Stop³ Alarm mitgeliefert werden. Silbersterne werden vergeben, wenn das Kind auf den Alarm reagiert und es ist nur ein kleiner nasser Fleck im Bett. Goldsterne werden verliehen, wenn das Kind die ganze Nacht trocken war.
- 8 - Es wird empfohlen, dass Essen und Trinken abends vermieden werden. Kinder, die Bettnässen sollten auf die Aufnahme von Koffein und Schokolade tagsüber verzichten.
- 9 - Und nicht vergessen – gute Toilettengewohnheiten tagsüber führen zu nächtlichem Trocken sein!!

Wartung und Reinigung:

Außer gelegentlichem Wechsel der Batterien braucht Ihr neues Wet-Stop³ nur sehr geringe Wartung. Wischen Sie den Alarmsensor nach jeder Benutzung mit einem trockenen Tuch ab. Der Alarm ist nicht wasserdicht. Halten Sie ihn nicht unter fließendes Wasser. Tauchen Sie ihn auch nicht vollständig ins Wasser oder andere Flüssigkeiten. Zusätzliche Sensoren können Sie bestellen bei PottyMD.

Batteriewechsel und –Entsorgung:

Die Batterien sollten gewechselt werden, wenn der Alarm nicht funktioniert, der Klang oder die Vibrationen schwächer werden oder wenn der weiße Knopf nicht mehr blinkt, wenn man ihn drückt. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite des Gerätes. Entnehmen Sie die alten Batterien. Fügen Sie zwei neue AAA Batterien ein in das Fach. Entsorgen Sie die Batterien fachgerecht – Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie die Batterien entsorgen sollten, bitte wenden Sie sich an die örtlichen Stellen, wie z. B. das Umweltamt. Sollten Sie das Wet-Stop³ System entsorgen wollen nach der Benutzung, entnehmen Sie die Batterien und entsorgen Sie das Gerät wie alle anderen ungiftigen elektronischen Haushaltsgeräte.

Zu Beachten:

- 1 - Das Wet-Stop³ System ist nicht geeignet für das Toilettentraining bei Kleinkindern oder für Inkontinenzprobleme. Das Wet-Stop³ System sollte nicht benutzt werden bei Kindern unter 4 Jahren, außer wenn vom Arzt verschrieben.
- 2 - Wenn Sie das Gerät einsetzen achten Sie bitte darauf, dass es sich nicht in irgendeiner Weise um den Benutzer wickelt.
- 3 - Um Erstickungsunfälle zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass keine Teile in den Mund gesteckt werden.
- 4 - Sollten Sie zur Anbringung des Systems eine Sicherheitsnadel benutzen, wählen Sie eine Nadel, die sich nicht aus Versehen öffnen kann. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Verletzungen bei Benutzung einer Sicherheitsnadel. Das Wet-Stop³ System ist nur für die Benutzung mit dem Magnetriemen konstruiert.
- 5 - Ihr Kind könnte durch den Klang des Alarms verwirrt werden. Legen Sie einen weichen Teppich oder ein Kissen vor das Bett, um Verletzungen zu vermeiden sollte das Kind aus dem Bett fallen beim Aufwachen durch den Alarm. Minimieren Sie die Höhe des Bettes so weit wie möglich.
- 6 - Wet-Stop³ ist nicht geeignet für mehrere Nutzer.
- 7 - Bewahren Sie Wet-Stop³ an einem kühlen, trockenen Ort auf wenn es nicht genutzt wird.

Garantie:





Der Hersteller gibt eine einjährige Garantie für Defekte in Material und Herstellung, sollte das Gerät fehlerhaft sein oder nicht ordnungsgemäß funktionieren bei normaler Nutzung. Die Garantie gilt nicht bei Missbrauch oder spezieller Nutzung. PottyMD wird, nach eigenem Ermessen, das Gerät gebührenfrei ersetzten oder reparieren. Diese Garantie gibt Ihnen spezielle und andere Rechte nach dem Gesetz. Für Systeme, die nicht direkt bei PottyMD erworben wurden, ist es notwendig dass Sie eine gültigen Verkaufsbeleg vorweisen, sollten Sie einen Ersatz wünschen. Versandkosten werden vom Kunden getragen. PottyMD behält sich das Recht vor, Bestimmungen und Garantiebedingungen ohne Vorankündigung zu ändern.

Zusätzliche Informationen:

Zusätzliche technische Information können Sie einholen bei PottyMD. Sie können uns anrufen oder ein Email senden, sollten Sie Fragen haben zu dem Gerät. Andere nützliche Informationen zum Thema Bettnässen und dem PottyMD Wet-Stop³ Gerät finden Sie auf unseren PottyMD Webseiten unter www.wet-stop.com and www.pottymd.com.



Knoxville, TN USA
Toll-free (in USA & Canada): 877-768-8963
Tel: 865-584-6700 • fax: 865-584-6703
e-mail: support@pottymd.com • web: www.pottymd.com

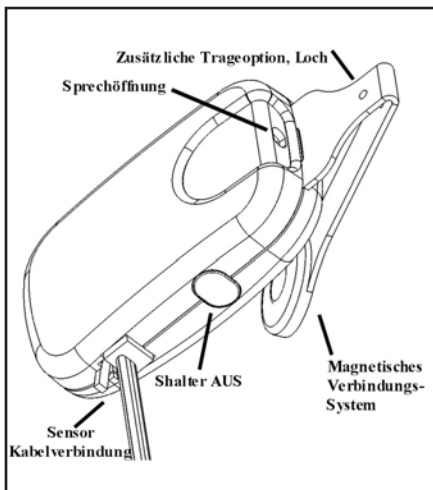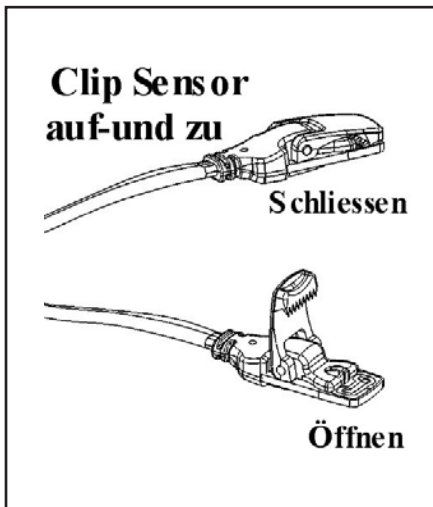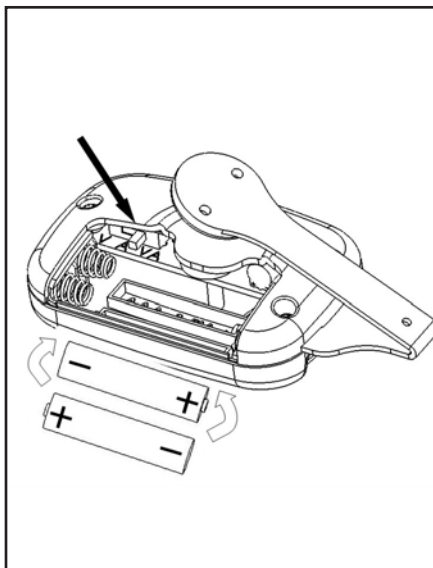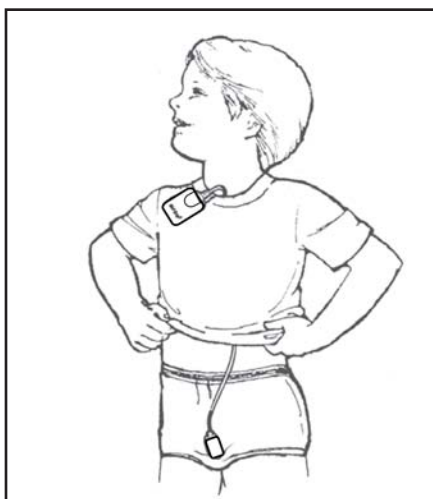

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany



CE Konformitätsmarke



Typ B Ausrüstung



Siehe Gebrauchsanweisung



Batterie

Doc. #W103German